



BĚLENÍ ZUBŮ S YOTUEL

Přípravky pro bělení zubů Yotuel jsou vhodné jak pro domácí, tak pro ordinanční bělení. Stačí si vybrat vhodný druh. Yotuel 35% peroxid vodíku se pro svou vysokou koncentraci používá při bělení v ambulanci.

Příprava

Před každým bělením je nutné navštívit stomatologa nebo dentálního hygienika, který prohlédne vaše ústa a rozhodne, zda je váš chrup pro bělení vhodný. Znamená to, že zuby i dásně musí být zcela zdravé, nepoškozené, bez umělých zubních náhrad a projevů zánětů nebo krvácivosti. Pokud lékař shledá, že jste vhodným adeptem, je nezbytné před bělením vykonat ústní hygienu a dokonale odstranit nečistoty, zubní kámen, pigmentaci a zubní plak. Dentální hygienik, v našem případě Michaela Horová s ordinací v Praze 10, poté na úvod vybere aktuální odstín zubů tak, aby se po zákroku mohl zjistit výsledek bělení tj. o kolik odstínů se podařilo zuby zesvětlit. Cílem nikdy nejsou sněhově bílé zuby, protože ty působí v ústech nepřírodně až uměle. Odstín se vybírá pomocí standardizovaného stomatologického Vita vzorníku.

Bělení

Samotný zákrok se skládá z několika částí a je vykonáván na zubařském křesle, stejně jako jakákoliv prohlídka u vašeho stomatologa. Hygienik nejdříve ošetří vaše rty vazelínou, aby byly vláčné a nepoškodily se zavedením rozvěrače. Poté se do úst vsadí rozvěrač, který izoluje zuby od zbývajících

částí úst. Bývá podložen vatovými tampóny pro větší komfort pacienta. V této poloze byste měli vydržet bez hnutí po celou dobu trvání zákroku. Aby dásně nebyly poškozeny bělicí látkou, nanese na ně dentální hygienik dásňovou ochranu. Ta zakrývá zbývající neodizolované části dásně. Nyní se již může přistoupit k samotnému bělení. Hygienik nanese na sklovinu bělicí gel Yotuel 35% peroxid vodíku a nechá jej 10 minut působit, poté ještě na gelovou vrstvu nanese aktivátor, který chemickou reakci znovu stimuluje. Po dalších deseti minutách se gel odsaje a postup bělení se zopakuje ještě jednou. U našeho pacienta se podařilo zuby vybělit o 10 odstínů Vita stupnice, tj. z odstínu A 3,5 na odstín A 1. Celé bělení díky Yotuel systému probíhá v pH neutrálním prostředí, takže nedochází k poškozování skloviny.

Po zákroku

Pacient není po bělení zubů prakticky nijak zásadně limitován, může bez obav jíst a pít. Vyvarovat by se měl jen požívání barevných potravin jako jsou kečup, hořčice, borůvky, kari, červené víno, černý čaj nebo káva, a to alespoň 24 hodin po zákroku. Bělost skloviny také zásadně ovlivňuje kouření, případně i nedokonalé nanesení rtěnky, která může na zubech ulpět. Pro větší účinek může pacient podstoupit dobělení nebo domácí bělení přípravky Yotuel. Optimální je bělení zopakovat za několik měsíců až rok pro obnovení cíleného odstínu bělosti.

PR



INZERCE

YOTUEL®

VÍCE NEŽ JEN BĚLENÍ POKROČILÝ PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM


K DOSTÁNÍ VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ
ČI U VAŠEHO STOMATOLOGA!

DOMÁCÍ BĚLENÍ

PŘÍPRAVEK S KARBAMID PEROXIDEM (10%)

YOTUEL® 7 HOURS

- 10% karbamid peroxidu
 - obsahuje 2x6 ml bělicího gelu
 - rychlý a účinný systém domácího bělení
 - obsahuje vytvarovaný nosič vhodný pro pacienty, kteří mají špatnou toleranci na profesionální otisky
 - cenově dostupný bělicí systém s vysokou akceptací
- 7 aplikací – doporučená cena 420 Kč

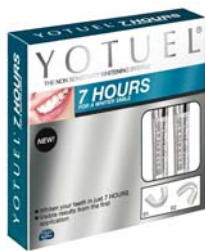

Yotuel je systém bělicích přípravků vyvinutý stomatologem. Množství nezávislých studií výzkumnými laboratořemi potvrzuje výborný bělicí a profylaktický efekt produktů Yotuel.

PRINCIP BĚLENÍ

Karbamid peroxid je jediná klinicky ověřená látka, která prostupuje do struktury zubu a odbarvuje pigmenty v ní usazené, zubní sklovina zůstává nepoškozena.

BĚLICÍ PŘÍPRAVKY YOTUEL PRO DOMÁCÍ BĚLENÍ

Široká škála Yotuel přípravků pro domácí bělení je vhodná jak pro delší udržení bílých zubů po ordinančním bělení, tak pro Vás, kteří hledáte šetrnou, levnou a časově nenáročnou metodu, aby Váš úsměv zářil. Všechny bělicí sety jsou doplněny podrobným postupem v češtině. Efektivní je kombinovat přípravky s karbamid peroxidem s přípravky bez karbamidu – například používat bělicí zubní pastu spolu s bělicí tyčinkou.



PŘED



PO

