



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

YOTUEL® FOTOPOLYMERIZUJÍCÍ CHRÁNIČ DÁSNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Fotopolymerizující chránič dásní YOTUEL® je lehce tvrdnoucí ochrana dásní, která se používá podobně jako gumový chránič pro izolaci dásně od zubů, které ošetřujeme.

ÚČEL:

Chrání dásně při bělení zubů.

KONTRAINDIKACE:

Nesnášenlivost vůči určitým složkám.

PŘÍPRAVA:

Zajistěte (např. pomocí dásňového retraktoru), aby rty byly během procedury (a následného bělení) v bezpečné poloze a materiálu se nedotýkaly (foto 1). Odstraňte uzávěr injekce a nahraďte ho aplikátorem. Nastavte potřebný průtok látky.

APLIKACE:

Osušte dásně. Aplikujte dásňovou ochranu YOTUEL® všude, kde je dásně v blízkosti zubů (foto 2). 20-40 vteřin vytvrzujte pomocí lehké tvrdící ruční lampy (foto 3). Nedržte lampu příliš dlouho nad jedním místem. Po vytvrzení odstraňte přebytečný materiál ze zubů pomocí skalpelu. Nyní lze aplikovat bělicí gel.

KONEC:

Po bělení odstraňte dásňovou ochranu YOTUEL® – na jednom konci ji zvedněte pomocí vhodného nástroje a odtrhněte (foto 4). Sejměte z injekce aplikátor a vraťte na jeho místo uzávěr.

ŽIVOTNOST:

Nepoužívejte dásňovou ochranu YOTUEL® po vypršení záruční lhůty. Skladujte v chladu. Nevystavujte teplu a přímému světlu.

Tento produkt obsahuje dimethakrylát a nesmí se užívat u pacientů, kteří jsou vůči této látce nesnášenliví či alergičtí.

6

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ:

- 1/ DENTAL OFFICE 10 MINUTE KIT - GEL
- 2/ DENTAL OFFICE 10 MINUTE KIT - AKCELERÁTOR
- 3/ SPECIAL KIT - tekutina
- 4/ SPECIAL KIT- akcelerátor
- 5/ PATIENT KIT
- 6/ STARTER KIT
- 7/ PLUS COMPACT

Tyto bezpečnostní listy jsou zaregistrovány na Ministerstvu zdravotnictví REG-332-4.10.04/28909 a jsou volně dostupné ke stažení na www.yotuel.cz.

YOTUEL® PRODUKTY PRO PROFESIONÁLNÍ BĚLENÍ

YOTUEL® 10 MINUTES



pro mladší pacienty nebo pacienty se zvýšenou citlivostí zubů/dásní

- 30% karbamid peroxidu + chemický aktivátor
- šetrný systém při zachování stejné účinnosti
- pro citlivé zuby a dásně
- vzhledem k šetrnosti není zapotřebí chránit dásně
- doporučena 3 – 4 sezení nebo v kombinaci s domácím bělením



BALENÍ	
Y972462T PRO 40 APLIKACÍ	4 × 12,5 ml bělicí gel 1 × 10 ml chemický aktivátor 1 × bělicí zubní pasta
Y972462S PRO 40 APLIKACÍ	8 × 2,0 ml bělicí gel ve stříkačce 1 × 10 ml chemický aktivátor 1 × bělicí zubní pasta
yPT09075 Mini-kit PRO 10 APLIKACÍ	2 × 2,0 ml bělicí gel ve stříkačce 1 × 10 ml chemický aktivátor 1 × bělicí zubní pasta

POČET APLIKACÍ PRO DOSAŽENÍ VYSOKÉ ÚČINNOSTI

POUZE PROFESIONÁLNÍ BĚLENÍ						
1	2	3	4	5	6	7

ordinační aplikace

domácí bělení

KOMBINOVANÉ BĚLENÍ							
1	2	3	4	5	6	7	8

DOMÁCÍ BĚLENÍ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7

XYLITOL
FLUORID
DRASLÍK
pH neutrální

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY NA DOMÁCÍ BĚLENÍ

(prodej v dentálních klinikách a ordinacích)

YOTUEL PATIENT



pro každého pacienta s individuálním výběrem vhodné koncentrace

- 10%, 16%, 22% karbamid peroxidu
- dokončí bělicí proces zahájený v ordinaci
- ústní nosič na míru vytvořený pacientovi v ordinaci

BALENÍ
2 × 40 ml bělicí gel / 8 × 2,5 ml bělicího gelu ve stříkačkách
2 × fólie na zhotovení nosiče
1 × box na nosič
1 × bělicí zubní pasta

YOTUEL® UDRŽOVACÍ SYSTÉM VÝROBKŮ

YOTUEL 7 HOURS

- 10% karbamid peroxidu
- obsahuje 2 × 6 ml bělicího gelu
- rychlý a účinný systém domácího bělení
- obsahuje vytvarovaný nosič
- vhodné pro pacienty, kteří mají špatnou toleranci na profesionální otisky
- cenově dostupný bělicí systém s vysokou akceptací



YOTUEL® BĚLICÍ TUŽKA (9 g) & PERO (2 g)

- 10% karbamid peroxidu
- účinné i k bělení mezizubních prostor
- výrazně osvěžuje dech
- originální a jednoduché k použití
- atraktivní kosmetický doplněk pro každodenní použití



YOTUEL® UDRŽOVACÍ-BĚLICÍ ZUBNÍ PASTA NA BÁZI ENZYMŮ CLASSIC/PHARMA 50 ml

- xylitol (10%), fluorid (1 000ppm F), draslík, papaja, pyrofosforečnan, vitamin B5 (Pharma)
- neobsahuje detergenty
- nízká abraze 40/ 36 R.D.A
- pro citlivé zuby a podrážděné dásně



YOTUEL® UDRŽOVACÍ-BĚLICÍ ÚSTNÍ VODA 250 ml

- xylitol, fluorid, draslík, alantoin, polyfosforečnan
- bez alkoholu
- neobsahuje detergenty
- regeneruje podrážděné dásně



YOTUEL® UDRŽOVACÍ-BĚLICÍ ŽVÝKAČKY CLASSIC/PHARMA 10 ks

- xylitol, papaja, vitamin B5 (Pharma)
- bez cukru



8

NÁVOD K POUŽITÍ YOTUEL® 10 MINUTES

30% karbamid peroxid ve stříkačkách/tubách

VÍCE NEŽ JEN BĚLENÍ
POKROČILÝ PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM

- PŮSOBÍ V CELÉM pH NEUTRÁLNÍM PROSTŘEDÍ
- NÁSLEDNÁ PÉČE ZAJIŠTĚNA – obsahuje fluorid, xylitol a draslík
- KLINICKÉ STUDIE z předních univerzit a klinik světa



- CELOSVĚTOVÉ PATENTY – více jak 130 celosvětových patentů
- LÉKAŘI ze 76 zemí celého světa aplikují YOTUEL® BĚLICÍ SYSTÉM
- VEDOUcí POSTAVENÍ NA TRHU, např. v Itálii je Yotuel jedničkou v profesionálním bělení

YOTUEL®

JPS
Dentální výrobky

JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5
tel.: 235 518 936, zelená linka: 800 111 577
e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

JAKÝ VÝROBEK MOHU POUŽÍT?

Vyberte správný výrobek pro bělení, který Vám zajistí nejlepší výsledky. Pro pacienty starší 25 let umožní YOTUEL® SPECIAL lékaři vysokého stupně bělení, což zajišťuje vysoká koncentrace peroxidu vodíku (35%). Pro pacienty se zvýšenou citlivostí zubů či dásní je nejlepší možností aplikace bělicího systému YOTUEL® 10 MINUTES s karbamidem peroxidu (30%). Pro pacienty se zabarvenými zuby po užívání tetracyklinu doporučujeme následně domácí bělení YOTUEL® PATIENT, které může pacient používat až po dobu 6 měsíců.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ PŘED APLIKACÍ GELU

1. Určete barvu zubů před zahájením bělení. Tak můžete následně dokázat výsledky bělení. Lepších výsledků dosáhnete, když barvu budete posuzovat na denním světle.
 2. Použijte VITA stupnici srovnanou dle barevné škály:
B1/A1/B2/D2/A2/C1/C2/D4/A3/D3/B3/A3,5/B4/C3/A4/C4
 3. Produkty na bělení dosahují nejlepších výsledků, když jsou aplikovány na vyčištěné zuby.
- PO APLIKACI GELU**
1. Ukažte pacientovi finální barevný výsledek na VITA stupnici.
 2. Udělejte pacientovi vlastní nosič jako část následné péče, která jim pomůže k eventuálnímu dosažení lepších výsledků.



ORDINAČNÍ BĚLENÍ S YOTUEL® 10 MINUTES

Doba sezení:	2x10 minut*
Počet doporučených sezení:	3–4
Barevná změna:	až 10 odstínů VITA stupnice**
Výrobek:	YOTUEL® 10 MINUTES (30% karbamid peroxid) Výrobek pro následnou péči
Vybavení:	Lampa (doporučeno) Rozvírač rtů Chráníč dásní (doporučeno)
Indikace:	pro mladé pacienty nebo pacienty s citlivými zuby či dásněmi

V ORDINACI

Nejdříve si prosím přečtěte obecné doporučení. Vyčistěte zuby přiloženou zubní pastou nízkorychlostním rotačním kartáčkem. Chraňte rty vazelínou (Xerostom gel) a aplikujte rozvírač rtů. Sami posuďte, zda je nezbytná ochrana dásní pacienta ochranným silikonem s nízkou viskozitou. Pokud ano, aplikujte jej přesně podél linie, která odděluje zuby od dásní. Dále postupujte dle návodu k použití bělicího systému. Aplikujte jemnou vrstvu aktivovaného gelu na obě patra zubů najednou.

POUŽITÍ LAMPY

Použití lampy není nezbytné, ale pomůže k dosažení maximálního výsledku. Použijte lampu se studeným světlem (LED lampy) po co nejdelší dobu aplikace. Pozor na lampy, které zahřívají a mohly by způsobit přehřátí gelu a tím i zvýšení citlivosti dřeně. Dle návodu k použití aplikujte gel včetně dodržení doby aplikace gelu. Bělení ukončete důkladným vyčištěním gelu, až si budete jisti, že žádné zbytky gelu nezůstaly v ústech. Pohovořte s pacientem o nutnosti druhého sezení v průběhu 4-5 dnů. Vytvořte pacientovi vlastní ústní nosič pro následnou udržovací aplikaci YOTUEL® PATIENT (7 HOURS), jenž pomůže dosáhnout ještě výraznějšího odstínu zubů.

*2 x 30minut sezení je možné pro pacienty, kteří vyžadují delší léčebné období. Proloužené sezení může zajistit lepší výsledky, ale také se zvyšuje riziko zvýšení citlivosti zubů.
**Výsledky mohou být rozdílné dle každého jednotlivého případu.




NÁVOD K POUŽITÍ

1. Použijte nízkorychlostní rotační kartáček a vyčistěte zuby zubní pastou YOTUEL® s nízkou abrazivitou.
2. Pomocí vatových tamponů nebo rozvěračů rtů odtáhněte rty od zubů.
3. Promíchejte 0,5 ml gelu s 6-7 kapkami aktivátoru a aktivujte tak produkt. 0,5 ml gelu je přibližně velikost hrášku.

(Doporučení z praxe: na obě patra použijte 1 g gelu + 12 kapek. Pokud jste obdrželi produkt v injekčních stříkačkách, použijte pro přesné odměření stupnici uvedenou ze strany na stříkačce.)

(Doporučení z praxe: v místičce mixujeme, až vytvoříme gel. Čím více mícháme, tím více je gel transparentní a poté je jednodušší na nanášení.)

4. Gázou namočenou v teplé vodě navlhčete povrch zubů.

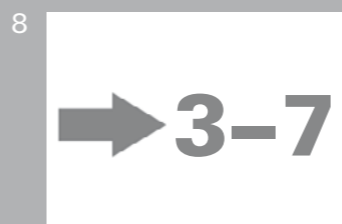


5. Okamžitě aplikujte aktivovaný gel na zuby, které si přejete bělit. Tloušťka gelu by měla být přibližně 1 mm.
6. Aktivovaný gel nechejte působit po dobu alespoň 10 – 15 minut.
7. Pro optimální výsledek použijte halogenovou lampu, plazmovou lampu nebo LED lampu. Pokud požadujete maximální účinky, ponechte aktivovaný gel po dobu 30 min. Poté opláchněte a odsajte všechn gel ze zubů.
8. Chcete-li optimalizovat výsledek, opakujte kroky 3 – 7.

Doporučení

1. Pokud jste produkt obdrželi v tubách, odstříhňte podle čáry špičku tuby. Gel bude vytékat snadněji.
2. Bělící proceduru provádějte nejprve na horních zubech, dokud nedosáhnete požadovaného odstínu. *(Doporučení z praxe: první aplikaci proveďte na obou patrech, druhých 20 min. pouze na horním.)*
3. Barvu dolních zubů ponechte o odstín tmavší. Výsledný efekt bude přirozenější.
4. Kvůli delší trvanlivosti uchovávejte produkt mimo dosah světla a tepla.
5. Pokud jste produkt obdrželi v tubách, je lépe skladovat je dnem vzhůru. Produkt bude snadněji vytékat.
6. Chcete-li dosáhnout rychlejšího výsledku, můžete aktivátor před použitím ponořit na pět minut do horké vody a zahřát ho tak.
7. YOTUEL® poskytuje gel s optimálním pH a aktivními substancemi. Díky patentovanému vzorci produktu není nutné používat vytvzovací světlo.
8. Uvažte a s pacientem prodiskutujte možnost opakování ordinačního bělení v průběhu následujících dní. Předějte pacientovi domácí sadu YOTUEL® Patient, aby dle pokynů uvedených v návodu dokončil bělicí proceduru doma.

→ VÝROBEK SKLADUJTE V CHLADU (V LEDNICI).

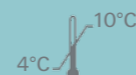

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ YOTUEL® SYSTÉMU

Biocosmetics Laboratories vyvinuly YOTUEL® bělicí systém zabraňující zvýšené citlivosti s jedinečným PATENTOVANÝM složením a maximální účinností. Jedná se o produkt navržený na bělení zubů bez zvýšení jejich citlivosti, přičemž ve stejnou dobu, co probíhá bělení, dochází k mineralizaci a posilování zubů.

YOTUEL® PROFESIONÁLNÍ BĚLICÍ SYSTÉM je k dispozici ve formě s karbamid peroxidem nebo peroxidem vodíku. YOTUEL® JE KOMPLETNÍ SYSTÉM, KTERÝ NABÍZÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PŘÍPAD*.

YOTUEL® nabízí vysoký počet možností pro každou jednotlivou indikační problematiku s rozsáhlými kombinacemi produktů a koncentrací. YOTUEL® JE VŠESTRANNÝ SYSTÉM S ŠIROKOU ŠKÁLOU PRODUKTŮ PRO PROFESIONÁLNÍ BĚLENÍ ZUBŮ A DENNÍ PĚČI PRO VŠECHNY TYPY ZUBŮ.

*Hodně zabarvené zuby způsobené tetracyklinovou léčbou bělíme invazivní metodou, jejíž výběr je závislý na rozhodnutí a úsudku lékaře. YOTUEL® SPECIAL je vhodný na tzv. vnitřní bělení.

YOTUEL® PATENTOVANÉ SLOŽENÍ OBSAHUJE



→ XYLITOL
→ FLUORID
→ DRASLÍK