


3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Adstringentní retrakční pasta

Snadnější a efektivnější retrakce

Na rozdíl od gingivální retrakce vláknů, jejichž umístění může být obtížné a časově náročné, představuje Adstringentní retrakční pasta při gingivální retrakci rychlejší, pohodlnější a efektivnější řešení. Kapsle s extra tenkými koncovkami zaručí aplikaci pasty s obsahem 15% chloridu hlinitého přímo do sulku, odtlačí gingivální tkáň od zubu a umožní tak detailní otisk okraje preparace.

- Zaručí čistý, suchý sulkus a silný hemostatický účinek
- Efektivně otevře sulkus
- Hygienické dávkování kapslemi pro jednorázové použití
- Jemná ke tkáním
- Pohodlnější a časově úsporný retrakční proces

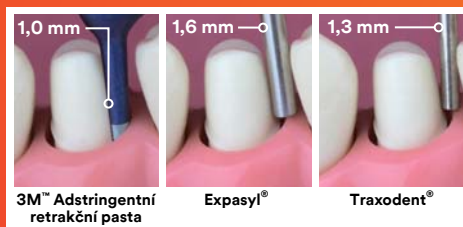

Indikace

Pasta je indikovaná pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého periodontia, jako např.:

- Otiskování (otiskovací hmotou či digitálně)
- Preparace tříd II a V
- Situační otisky

Materiál nesmí být použit u pacientů s onemocněním periodontia, otevřenými furkacemi a odkrytou kostí.


Retrakční pasta může být použita s nebo bez vlákna.



Jak použít adstringentní retrakční pastu? Snadné kroky k čistému a suchému pracovnímu poli



Kapsle pasují do většiny aplikačních kleští na kompozity. Vytlačte malé množství materiálu a zlikvidujte jej.

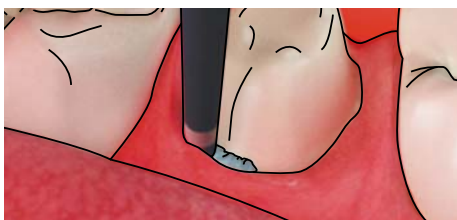

Vložte koncovku kapsle do sulku. Tkáň je mechanicky retrahovaná.



Pomalou a plynule vstříkujte pastu do sulku.



NEPOVINNÉ: Procedura s vlákny
Pro větší oddálení gingivy je možné použít pastu v kombinaci s vlákny.



Ponechte adstringentní pastu v sulku minimálně 2 min.



Kompletně odstraňte pastu vodním sprejem a vysušte.

Aplikace je velmi jednoduchá (user friendly). Materiál používám v následujících indikacích:

1. Jako pomocné retrakční médium použité následně po úpravě gingivy vysokofrekvenčním proudem. Prostor kolem preparační linie se stává velmi dobře otisknutelným.

2. Při marginální preparaci, kde není potřeba velké retrakce.

3. Při nutnosti udržet oddálenou gingivu po odstranění druhého retrakčního vlákna (nutná časová prodleva z jakéhokoliv důvodu).

MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D.

Informace pro objednání:

Obj. č.	Informace o produktu
56944	3M™ Adstringentní retrakční pasta 25 kapslí
56945	3M™ Adstringentní retrakční pasta ekonomické balení: 100 kapslí

Pozn.: Obsah jedné kapsle je dostatečný k ošetření až 3 zubů. Kapsle je na jedno použití a nesmí být použita na více pacientů.



Nepotřebujete žádné speciální aplikační kleště. lze použít běžně užívané kleště na kompozity.

3M

Oral Care Solutions Division
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
E-mail: 3mcesko@3m.com
www.3m.cz

3M je ochranná známka 3M. Použito v souladu s licencí v Kanadě. Ostatní ochranné známky jsou vlastněny jinými společnostmi.
© 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.