

3M Science.
Applied to Life.™



Rychlé zmírnění citlivosti. Pomalé uvolňování fluoridů.

Clinpro™ XT Varnish



3M™ Clinpro™ XT Varnish je zdravotnický prostředek. Všechny informace jsou obsaženy v návodu k použití, který je dostupný zde

3M™ Clinpro™ XT Varnish odolný ochranný lak

Chrání ohrožený povrch skloviny v okolí rovnátek.



Důkladné čištění v blízkosti ortodontických rovnátek může být pro pacienty problematické. V průběhu času to může vést ke vzniku bílých skvrn. Ochranný lak Clinpro™ XT Varnish pomáhá vytvářet bariéru proti demineralizaci a vzniku erozí v důsledku působení kyselin a tím chrání úsměv pacientů v průběhu ortodontické léčby.

Bílé skvrny




Clinpro™ XT Varnish ochranný lak s prodlouženým účinkem pomáhá chránit před vznikem bílých skvrn a zklamáním po sejmutí rovnátek.


Hlavní výhody

- Místně specifický ochranný lak polymerovaný světlem, který lze nanést okolo ortodontických rovnátek a zabránit tak demineralizaci a vzniku erozí v důsledku působení kyselin
- Obsahuje a uvolňuje fluoridy, vápník a fosfáty, a tak pomáhá chránit zuby před vznikem bílých skvrn v těžko dostupných místech v okolí rovnátek
- Zůstává na povrchu zuby po dobu 6 měsíců nebo déle
- Lak Clinpro™ XT Varnish je možné doplnit denním čištěním zubní pastou s obsahem fluoridu proti vzniku zubního kazu


Clinpro™ XT Varnish: ortodontická aplikace

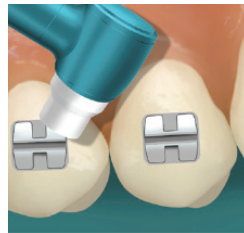


1. Vyčistěte povrch zubu.

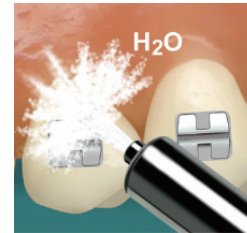

2. Opláchněte vodou.

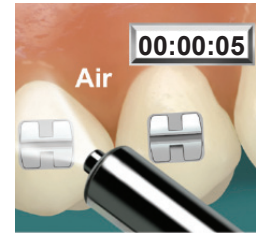


3. Vysušte vzduchem.

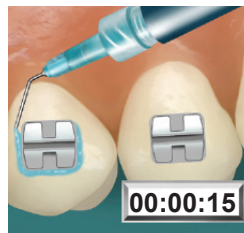

4. Naleptejte sklovinu zuby.




5. Opláchněte vodou.

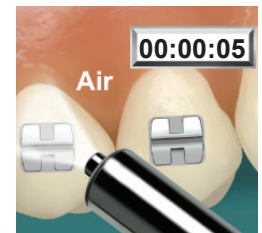

6. Vysušte nadbytečnou vodu vzduchem.




7. Nadávkujte na míchací podložku.

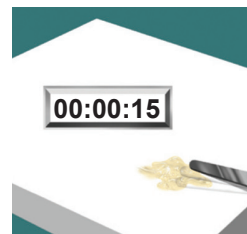


8. Míchejte po dobu 15 s.



9. Naneste tenkou vrstvu na povrch zuby. (pracovní čas 2:30 min)

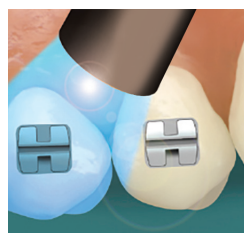

10. Vytvrdte světlem.

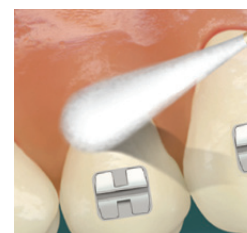

11. Povrch otřete vlhkou vatovou tyčinkou.

Popis produktu: Clinpro XT Varnish - Balení (1 x clicker à 10g), Objednávací číslo: 12348

Odolný ochranný lak světlem polymerovatelný. Uvolňuje fluoridy, které okamžitě vytváří odolnou vrstvu poskytující ochranu a ulevuje od přecitlivělých zubů.